



ご利用にあたって

- 「安全情報」は医療・福祉関係の方に向けて発信したものです。一般の方に向けた内容ではございませんのでご注意ください。
- 内容は、いずれも発行日時点のものです。常に最新の情報をご確認ください。



心電図モニターの重複表示に注意！

日本光電 WEP-3200 シリーズ[®] 4チャンネルモニターを使用して2つのチャンネルで同一患者のモニター設定をおこなってしまいました。誤表示に気づかないまま他患のモニター表示を見て治療をおこないました。



事例は4チャンネル表示のモニター画面を2チームで分割して使用していました。受信機側の設定をあやまって重複して表示させてしまいました。他チーム別の患者さんの心電図モニター画面を当該患者さんのモニター画面だと誤認したまま気づきませんでした。

改善策はメーカーに依頼して重複表示設定できないようにしました。自院の心電図モニター設定を確認して重複表示できないように実施してください。

・心電図モニターをセットする際は、かならず当該患者さんの表示であると確認してください。

心電図モニター画面情報と臨床経過で不一致があった際は、すぐに12誘導心電図を測定して確認することが必要です。